



Gültig für FFP2 und MNS Masken

Gebrauchsanweisung Schutzmasken

Halbmasken zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln.

Nicht gegen verdampfende Aerosole und Gase verwenden.

Wählen Sie Produkte entsprechend dem beruflichen Anwendungsbereich.

Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Die Masken sind für den Einzelgebrauch bestimmt. Maske nach Gebrauch wegwerfen.

Verlassen Sie sofort den Bereich und entfernen Sie die Atemschutzmasken, wenn das Atmen schwierig wird.

Wenn Schwindel oder andere Beschwerden auftreten, sowie Reizungen, Gerüche oder andere Verunreinigungen

zu bemerken sind, oder wenn die Atemschutzmasken beschädigt werden.

Ändern und reparieren Sie keine Teile der Maske.

Wenn Schäden auftreten oder die Maske durchfeuchtet ist, entfernen Sie die Maske und verwenden Sie eine Neue.

Nicht verwenden, wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist (siehe Verpackung).

Vor Gebrauch kontrollieren

Wählen Sie den Maskentyp entsprechend der Arbeitsanforderung.

Den Anweisungen des Herstellers ist zwingend zu folgen.

Verwendung und Einstellung

Nehmen Sie die Halbmaske aus der Verpackung.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Löcher in der Atemschutzzone befinden.

Passen Sie die ausgewählte Maske wie auf der Originalverpackung angegeben an ihr Gesicht an

Stellen Sie den Nasenclip mit beiden Händen auf die Form Ihrer Nase ein und atmen Sie stark aus um die Dichtigkeit zu prüfen.

Stellen Sie sicher, dass sich der Nasenclip an die Form Ihrer Nase und Ihres Gesichts anpasst.

Beim Abnehmen der Masken berühren Sie bitte NICHT die Maske, sondern nur die Ohrbänder.

Gesichtshaare und Narben, wenn sie zwischen dem Gesicht und der Maske sind, erhöhen die Leckage erheblich,

was zu einer Verringerung des Schutzes führt

Lagerung

Lagern Sie die Maske gemäß den Regeln des Herstellers.

Die Raumtemperatur des Lagerbereichs muss zwischen -20 ° und 40 ° C liegen.

Die Luftfeuchtigkeit des Lagerbereichs darf 80% nicht überschreiten.

FERMAMED GmbH

Ottostraße 1

84051 Essenbach

Germany

Info@fermamed.de